

S.O.T レスティングスプリント



別売りアクセサリー



リストストラップ MCPウエッジ



フィンガーディバイダー

用途：手関節、手指の安静保持

(脳卒中、脳性麻痺、関節リウマチ、橈骨神経麻痺、筋ジストロフィー、浮腫)

- 手関節、手指の安静保持
- 加工調整可能
- 母指球筋のサポート
- 外在指屈筋の保持、ストレッチ
- 浮腫リスクの予防
- 小児用サイズあり




加工説明動画がご覧いただけます。

脳卒中後、上肢に痙性、麻痺、痛み、感覚障害、固有感覚低下や浮腫といった症状が残ることは少なくありません。これら症状は上肢の運動性の減少の原因になり、最終的に関節の拘縮につながる可能性があります(図A)。従って、痙性が起こる前なるべく早い時期から装具を使用したハンドセラピーが重要と考えられます。


S.O.Tレスティングスプリントは、上肢の痙性や麻痺に対し運動性の増加、維持を目的としております。本製品は軽量で肌触りの良い仕上がりになっております。形状を調整できるアルミコアがポリエチレンフォームに組み込まれております。本製品の納品時の形状は痛みの緩和、理想のバイオメカニカルポジションを提供できる安静肢位になっております。

装具を内在筋プラス肢位に調整することにより、関節リウマチにも利用頂けます。

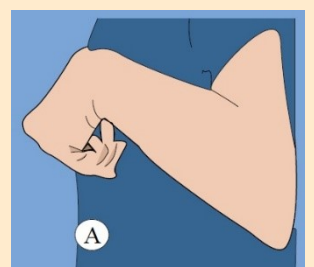

安静保持、MCP、CMC関節のサポート

- S.O.Tレストイングスプリントは安静肢位の状態で納品されます。個々の患者様に合わせてフィッティングの確認を行って下さい。
- S.O.Tレストイングスプリントは手のひらのアーチと母指をサポートします。また、本製品は解剖学的な形状をしており母指球筋、MCP、CMC関節のサポートを行います。


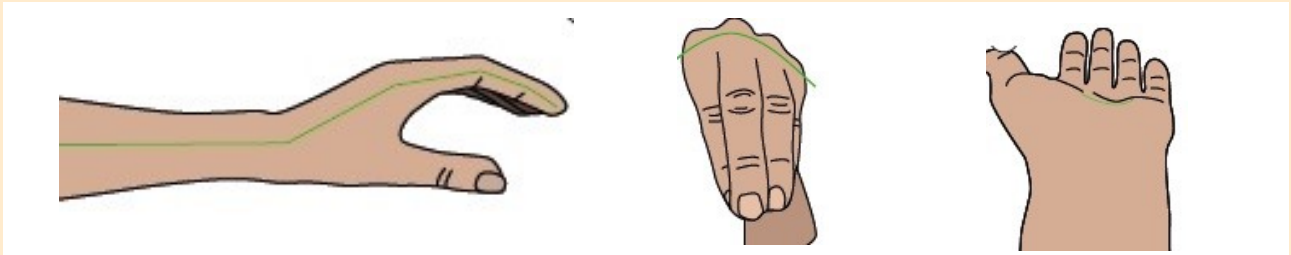


浮腫の予防

従来のストラップ式の固定では浮腫のリスクがあるため、本製品では伸縮性のあるカバーを使用し、面で装具を固定します。均一にプレッシャーがかかるカバー式なので、静脈還流を促進します。素材の表面はスベスベしているので、衣服着用時の違和感がありません。瘻性等で、より強固な手関節の固定が必要な場合は非伸縮性のリストストラップをご使用下さい（別売り）。

サイズ表

Item no	品名	左右	サイズ	計測 1	計測 2
				(MCP幅)	(手首から指先)
28710	S.O.Tレストイング スプリント	左右あり	XXXXS	5.5cm	< 12cm
			XXS	5.5 - 6.5cm	< 14cm
			XS	6.5 - 7.5cm	< 16cm
			S	6.5 - 7.5cm	< 18.5cm
			M	7.5 - 8.5cm	< 20cm
			L	8.5 - 9cm	< 21cm
別売りアクセサリ					
28711	MCPウエッジ	左右兼用	XXS	幅65mm	高さ10mm
			S	幅75mm	高さ15mm
			L	幅90mm	高さ20mm
28712	フィンガーディバイダー	左右兼用	P		
			M		
			L		
28713	リストストラップ	左右兼用	XXXXS - XS S - L		

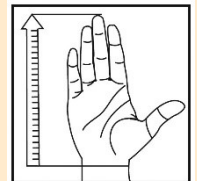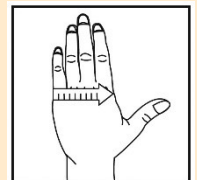

アクセサリ サイズ対応表

Item no	S.O.Tレストイング スプリント	XXXXS	XXS	XS	S	M	L
28711	MCPウエッジ	XXS		S		S or L	
28712	フィンガーディバイダー	P		M		M or L	
28713	リストストラップ	XXXXS - XS			S - L		



株式会社 田沢製作所 マーケティング部直通ダイヤル

〒113-0033 東京都文京区本郷1-35-28 メゾンドール本郷2F TEL.03-3812-6481 FAX.03-5804-8595